

ŽÁDANKA NA VYŠETŘENÍ KRVE

QuantiFERON®-TB test (1 zkumavka s Li-heparinem, min. objem 5 ml)

T-SPOT.TB test (2 zkumavky s Li-heparinem, min. objem 8 ml)

Prosím zaškrtněte vhodnou variantu.

Kontakt na odpovědnou osobu: 556 416 244

PROSÍME NEODEBÍRAT V PÁTEK A DEN PŘED SVÁTKEM! (POKYNY K ODBĚRU: VIZ. ZADNÍ STRANA)

INFORMACE O PACIENTOVI

Jméno a příjmení:

Číslo pojištění:

Pojišťovna:

Pohlaví: Muž Žena

Datum a čas odběru:

Základní diagnóza:

RAZÍTKO A PODPIS LÉKAŘE, IČZ / ODBORNOST:

DŮVOD PROVEDENÍ TESTU:

Kontakt s aktivní TBC: ANO NE

K vyloučení latentní TBC při imunosupresivní terapii: ANO NE

Suspektní TBC: ANO NE

TBC V OSOBNÍ ANAMNÉZE:

bakteriologicky ověřená bakteriologicky neověřená histologicky ověřená mikroskopická pozitivita ART

kultivačně (M. tuberculosis, M. bovis) mykobakterióza (M. kansasii, M. marinum, M. szulgai)

průkaz DNA/RNA komplexu M. tuberculosis

TERAPIE ZÁKLADNÍMI ANTITUBERKULOTIKY:

ANO NE Pokud ano, od kdy (datum): její trvání:

IMUNOSUPRESIVNÍ TERAPIE:

Přípravek: od do

BCG VAKCINACE:

ANO NE

TEST MANTOUX II:

ANO NE V posledním roce – datum: hodnota:

DALŠÍ INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU TESTU:

(např. jiná onemocnění, pracovní anamnéza – riziko TBC, TBC v rodinné anamnéze atp.)

POKYNY K ODBĚRU PRO VYŠETŘENÍ QUANTIFERON®-TB TEST A T-SPOT.TB TEST

Krev je nutné odebrat do zkumavky na odběr krve obsahující lithium heparin jako antikoagulancium. Jiná antikoagulancia naruší analýzu. Naplňte zkumavky pro odběr krve, **minimální objem 5 ml pro vyšetření QuantiFERON®-TB a minimální objem 2 x 4 ml pro vyšetření T-SPOT.TB** a jemně promíchejte několikrát obrácením dna vzhůru, aby se heparin rozpustil. Krev by se měla uchovávat při pokojové teplotě ($22^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$). Inkubace se musí zahájit **do 16 hodin od odběru krve** v případě vyšetření **QuantiFERON®-TB**. V případě vyšetření **T-SPOT.TB je nutný transport krve do laboratoře maximálně do 6 hodin po odběru.**

Odběrové dny: pondělí až čtvrtek

PROSÍME NEODEBÍRAT V PÁTEK A DEN PŘED SVÁTKEM!